

# INSTRUÇÕES DE USO

---

## Cateter Ureteral

---

**NOME COMERCIAL:** Cateter Ureteral

### INDICAÇÕES DE USO

Cateteres ureterais são usados para drenagem e navegação de um ureter tortuoso.

Tempo de permanência de contato permitido do paciente com o produto: Até 29 dias de uso contínuo

### FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL

O produto é comercializado individualmente, esterilizado através de óxido de etileno, em embalagem tyvek estéril (polipropileno), reembalada em caixa de papelão com tamanho e forma adequado para proteção do produto até o momento do uso.

Cada embalagem contém:

1 Cateter Ureteral

1 Instrução de Uso;

### MODO DE USO DO PRODUTO

1. O cateter é usado para retrógrado / medir o comprimento do ureter para a seleção adequada do stent a ser inserido.  
Retrógrado:
2. Avance a ponta flexível do fio-guia no ureter através do canal de trabalho do cistoscópio que foi inserido transuretral na bexiga.
3. O fio-guia deve ser posicionado de forma que a ponta flexível possa ser vista sob fluoroscopia ou ultrassom na pelve renal.
4. Depois de assegurar a posição do fio-guia na região renal, passe o cateter sobre o fio-guia assim que o cateter chegar ao local, remova o fio-guia deixando o cateter na pelve.
5. O médico pode medicar passando fluido através do cateter ou pode usar para medir o comprimento do ureter para selecionar o comprimento correto do stent para implante de stent.
6. O produto deverá ser descartado de acordo com as normas hospitalares.

Tempo de permanência de contato permitido do paciente com o produto: Até 29 dias de uso contínuo.

OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.

## **MODELOS**

Diâmetro: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr

Comprimento: 70 cm

Pontas: Cone; Angular; Fechada; Aberta e Oliva

## **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE**

O produto deve ser armazenado e transportado em temperatura de 0°C a 45°C. Manter em local fresco, seco e escuro. Manter longe da luz solar direta. Não expor a solventes orgânicos, radiações ionizantes ou luz ultravioleta.

## **ADVERTÊNCIAS**

- Fabricante recomenda o uso único;
- Produto Estéril - Óxido de Etileno
- O cateter ureteral deve ser colocado apenas por médicos ou outros profissionais qualificados e com equipamento normalmente utilizados para colocação desse tipo de dispositivo.
- O produto é fornecido estéril desde que a embalagem tenha sido manuseada de maneira adequada e não esteja aberta e nem danificada. Não utilize o produto em caso de danos visíveis na embalagem.

## **PRECAUÇÕES**

- Retirar da embalagem apenas antes de iniciar a sua utilização, seguindo o procedimento cirúrgico adequado;

## **CONTRAINDICAÇÕES**

- Não utilize o produto se o paciente for alérgico ao material de construção.

## **EFEITOS ADVERSOS**

- Perda Urinária

- Estenose Ureteral
- Trauma Tecidual
- Infecção do Trato Urinário
- Hematúria
- Infecção
- Reação Alérgica ao Meio de Contração

**PRAZO DE VALIDADE**

05 anos

**FABRICANTE - LEGAL E REAL:**

Razão Social: NIKOTECH

Endereço: No.2, Preethidham School Road, Myalasanra, Begur Koppa Road, Bengaluru Urban, Bangalore-560068, Karnataka, INDIA

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

Razão Social: MEDHCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 42.520.836/0001-67

Endereço: Rua Visconde de Nacar, N.º 978, SLJ 03 - Centro Histórico CEP: 83.203-230 -

PARANAGUÁ/PR

Número da notificação Anvisa: 83026999006